

## Набір запобігання та зупинення гіпотермії

- Зніміть з постраждалого мокрий одяг і замініть сухим одягом, якщо наявний
- Відкрийте набір запобігання та зупинення гіпотермії
- Активуйте самонагрівну ковдру, витягнувши її з пластикової упаковки
- Обгорніть торс постраждалого самонагрівною ковдрою, між пацієнтом та ковдрою обов'язково повинен бути шар матеріалу\*
- Загорніть постраждалого у захисну оболонку та закріпіть її застібками-липучками. Обов'язково підіткніть оболонку навколо та під постраждалого
- Надіньте на постраждалого відбиваючу шапку, щоб запобігти втраті тепла через голову
- Швидко перевезіть постраждалого до медичного закладу

\*Увага: **НЕ** кладіть нагрівну ковдру прямо на шкіру постраждалого




## Евакуаційні носилки Talon II, модель 90С



Крок 1: Розпустіть пряжки

Крок 2: Покладіть носилки на землю і повністю розгорніть стороною з

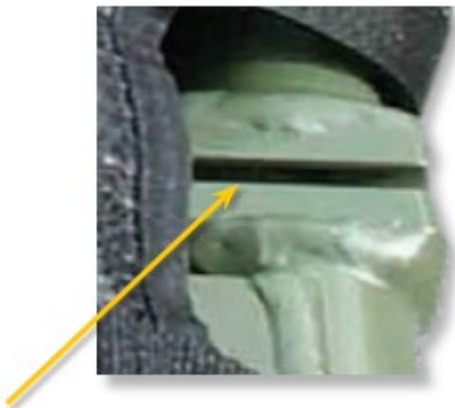

тканиною доверху.

Зауважте: коли носилки у вільному положенні, шарніри, найближчі до вас, коли ви тримаєте ручки, виглядатимуть ось так.



Крок 3: Візьміть ручки і крутіть до середини, поки шарніри не повернуться і не замкнуться.



Крок 4. Підтримуючи замкнуте положення шарнірів, сильно рівномірно натисніть на розсувну планку ногою. Посиліть тиск ногою, доки розсувна планка не замкнеться у кінцевому положенні.

Щоб згорнути: повторіть кроки у зворотньому порядку.